


УРАЛЕЦ М

ТУ 13.95.10-944-05795731-2020

Маска медицинская одноразовая УРАЛЕЦ М

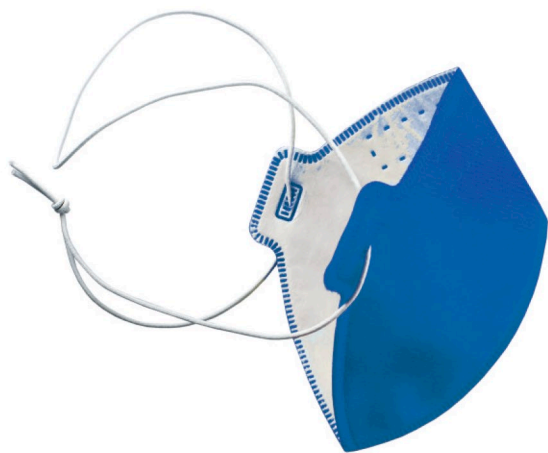

Назначение

Маска Уралец М, закрывающая носовую и ротовую полость, предназначена для предупреждения внешнего инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

Применение

Маска Уралец М применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.

Продолжительность использования маски – не более 8 часов.

Состав

Маска Уралец М представляет корпус, состоящий из двух слоев фильтрующего материала: наружной оболочки и фильтр-пластины, с оголовьем в виде резинового шнура. Маска имеет вертикальное сложение, упаковывается в индивидуальный пакет в количестве 1 шт. или 20 шт. вместе с инструкцией по применению.

Эксплуатационные свойства

- ✓ Универсальный размер, одноразовое применение;
- ✓ Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- ✓ Плотное прилегание маски к лицу увеличивает ее эффективность;
- ✓ Складывающаяся конструкция обеспечивает удобство при хранении и транспортировании;
- ✓ Использование новой маски должно сопровождаться процедурой дезинфекции рук;
- ✓ После использования маска утилизируется.

Подготовка маски к работе



1. Завяжите концы резинового шнура оголовья*.
2. Наденьте оголовье на шею.
3. Начиная с подбородка наденьте маску на лицо, расположите оставшуюся часть оголовья на теменной части головы.
4. Маска готова к применению. Правильно надетая маска должна плотно прилегать к лицу, но не оказывать давления.

* Если оголовье поставляется отдельно от корпуса, проденьте резиновый шнур через отверстия на корпусе.

Технические характеристики маски медицинской Уралец М

Наименование показателя	Значение показателя
Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе и выдохе при объемном расходе 30 дм ³ /мин, Па, не более	70
Коэффициент проницаемости по стандартному масляному туману, %, не более	6,0
Масса, г, не более	9

Гарантийный срок хранения

3 года в упаковке организации-изготовителя с момента изготовления.

Разрешающие документы к использованию

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9938 допускает медицинские маски одноразовые по ТУ 13.95.10-944-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.

Производитель

АО «Сорбент» г. Пермь